

Quick Start - Get To Know Your Pump

Inicio Rápido- conozca su extractor



Rumble Tuff®

**Mode Button (tap) /
Vacuum Adjusting Wheel (dial)**
Botón de Modo (toque) /
Rueda de Ajuste de Succión (perilla)

Memory Button
Botón de Memoria

LCD Screen
Pantalla LED

Dust Cover / Vacuum Inlet
Cubierta Antipolvo /
Entrada de Succión

On / Off Button
Botón para Encender / Apagar



Left/Lado



AC / DC Adapter Plug In
Enchufe el adaptador de corriente

Front/frente



**Open the Dust Cover to access
the Vacuum Inlet**
Abra la Cubierta Antipolvo para
acceder a la Entrada de Succión

⚠ Before using your pump for the first time, please read the User Manual for more detailed instructions.



Antes de extraer leche por primer vez, lea las instrucciones de uso de su producto.

Wash Lavar

Before first use and after each use
Antes del primer uso y después de cada uso.



Sanitize Desinfectar

Before first use and once per day
Antes del primer uso y una vez al día.



Note:

- Do not wash or boil the tubing. If it becomes visibly dirty, wipe it clean with a warm, damp cloth.
- Before use, wash and sanitize all parts that may come in contact with the breast or breast milk.
- For more detailed use and care instructions, please refer to the User Manual.
- For best results, pump parts should be completely dry before use.

Nota:


- No lave ni hierva el tubo. Si se ensucia visiblemente, límpiolo con un paño caliente y húmedo.
- Lave y desinfecte todas las partes que toquen el pecho o la leche materna antes de usarla por primera vez.
- Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre el uso y el cuidado.
- Para obtener los mejores resultados, las piezas del extractor deben estar completamente secas antes de su uso.

- Scan code to access Bottle Assembly/Inspection Video
- Escanee código para acceder el video de Inspeccion y Ensamblaje de Botella



Expression Collection Combo Kit

Kit Combo Expresión de Colección

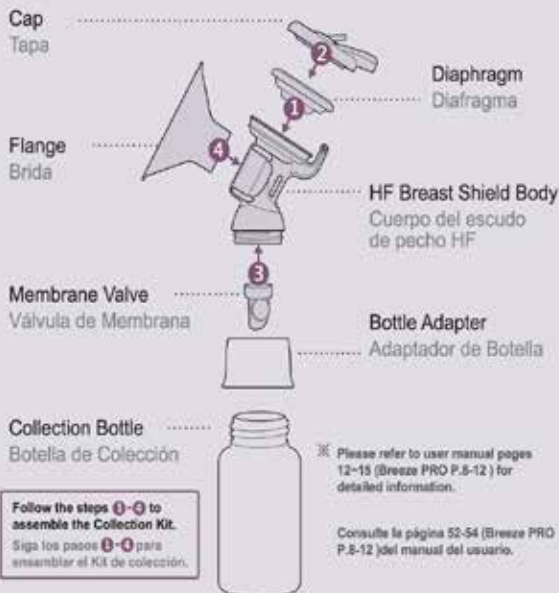

- ⊗ Breeze PRO may be used by more than one user if the proprietary Rumble Tuff Collection Kits are used and are not shared.
Breeze PRO puede ser utilizado por más de un usuario si los Kits de Colección de Rumble Tuff se usan y no se comparten.

BREEZE 柔情

電動吸乳器快速使用說明

集乳器配件說明



單向閥裝設說明:



將含負壓閥的喇叭罩
喇叭殼安裝在喇叭殼
頂上(如左圖)。



將含負壓閥喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
頂上(如左圖)。



確保負壓閥與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
頂上(如左圖)。

清洗喇叭罩時，將喇叭罩輕輕拉開，但不要把喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼中清潔劑清洗，再用溫水沖乾淨。
清洗完畢後，將喇叭罩蓋到喇叭殼喇叭殼，使喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼密封良好。

請認真向圖中指示方向如下圖所示正確持握乳器操作



1. 將喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
喇叭殼頂上。



2. 將喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
喇叭殼頂上，使喇叭罩
喇叭殼與喇叭殼喇叭殼
喇叭殼密封良好。



3. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。



4. 此喇叭罩，喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
喇叭殼頂上。



4-1. 將喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
喇叭殼頂上，使喇叭罩
喇叭殼與喇叭殼喇叭殼
喇叭殼密封良好。



4-2. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。

注意：不要隨意更換喇叭罩喇叭殼，應於喇叭罩喇叭殼頂上，使喇叭罩喇叭殼與喇叭殼喇叭殼密封良好。

注意：喇叭罩與喇叭殼必須同時更換，以免造成吸力減弱。



5. 將喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
喇叭殼頂上。



6. 將喇叭罩與喇叭殼
喇叭殼安裝在喇叭殼
喇叭殼頂上，使喇叭罩
喇叭殼與喇叭殼喇叭殼
喇叭殼密封良好。



7. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。



8. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。



9. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。



10. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。



11. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。



12. 認真向圖中指示方向
如下圖所示正確持握
乳器操作。

注意：請確認裝置內，必須完全裝填球蓋。



關於主機


語言/音響模式

1. 按下M (喇叭) 按鈕，並進入喇叭模式。
2. 按下喇叭按鈕，開始喇叭音響。
3. 旋轉 (喇叭) 按鈕，選擇你想要的喇叭音響。
4. 旋轉 (喇叭) 按鈕，選擇你想要的喇叭音響。
5. 再次旋轉 (喇叭) 按鈕，選擇你想要的喇叭音響。

- 母乳模式
- 無乳模式
- 強力按摩
- 電池電量顯示



時間/溫度顯示

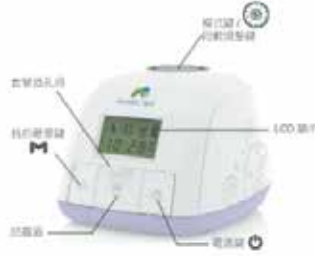

喇叭音響
喇叭音響
喇叭音響