

La instrucción de limpieza y desinfección del extractor de leche eléctrico multiusuario Rumble Tuff

Las siguientes instrucciones de limpieza son para el hospital, agencia de alquiler o profesional de lactancia que alquila el extractor de leche eléctrico multiusuario Rumble Tuff.



Aviso: La bomba extractora de leche eléctrica multiusuario Rumble Tuff está diseñada y destinada a múltiples usuarios, siempre que sea utilizada por un usuario a la vez y los kits de biberón NO se compartan. La consola de la bomba debe limpiarse y desinfectarse a fondo antes de distribuirse al siguiente usuario.

Los extractores de leche Rumble Tuff están diseñados con un diafragma antirreflujo encima de la botella de recolección. En el uso normal, la leche no fluirá a través de la tubería a la consola del extractor. Si la leche entra en la Consola del extractor, retire el extractor de la circulación y póngase en contacto con el Servicio al cliente de Rumble Tuff para obtener un reemplazo.

Instrucciones de inspección:

1. Inspeccione la consola del extractor y el cable de alimentación en busca de suciedad o residuos de leche.
2. Inspeccione las entradas de succión por residuos de leche dentro de la entrada. Si se encuentran escombros dentro, informe al Servicio al Cliente de Rumble Tuff. Ponga en cuarentena el extractor y no lo ponga en circulación. No intente desmontar la consola de la bomba ni limpiar el interior. Hacerlo puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada y anular la garantía

Limpieza:

1. Use un paño limpio y húmedo. Si es necesario, use un líquido de lavado básico o un detergente no abrasivo.
2. Para limpiar cualquier residuo de leche o suciedad, limpie la carcasa de la consola de la bomba, el cable de alimentación y la caja.

Desinfección:

1. Use CaviCide (recomendado), una toallita desechable desinfectante a base de alcohol o alcohol isopropílico (concentración del 70% o más).
2. Limpie la carcasa de la consola de la bomba, el cable de alimentación y la caja.

Almacenamiento:

Asegúrese de que la consola de la bomba y el cable de alimentación estén completamente secos antes de guardarlos dentro de la caja.

Servicio al Cliente de Rumble Tuff: Teléfono: 1-866-228-8388 • Correo electrónico: customerservice@rumbletuff.com

