

LED Indicator
Indicador LED

Decrease Suction Button
Botón para Reducir la Succión

Start/Pause Button
Botón de Inicio/Pausa

Increase Suction Button
botón de aumento de succión

Mode Button
Botón de Modo

Vacuum Inlet
Entrada de succión



Front/frente



Open the Dust Cover to access
the Vacuum Inlet
Abra la Cubierta Antipolvo para
acceder a la entrada de Succión

Back/De trás



On/Off Button
Botón de Encendido/apagado

AC/DC Adapter Plug In
Enchufe el adaptador de corrientes



Before using your pump for the first time, please read the User Manual for more detailed instructions.

Antes de extraerse la leche por primera vez, lea las instrucciones de uso de su producto.

Wash Lavar

Before first use and after each use
Antes del primer uso y después de cada uso.



Note:

- Do not wash or boil the tubing. If it becomes visibly dirty, wipe it clean with a warm, damp cloth.
- Before use, wash and sanitize all parts that may come in contact with the breast or breast milk.
- For more detailed use and care instructions, please refer to the User Manual.
- For best results, pump parts should be completely dry before use.

Note:

- No lave ni hierve el tubo. Si se ensucia visiblemente, límpielo con un paño caliente y húmedo.
- Lave y desinfecte todas las partes que toquen el pecho o la leche materna antes de usarla por primera vez.
- Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre el uso y el cuidado.
- Para obtener los mejores resultados, las piezas del extractor deben estar completamente secas antes de su uso.

- Scan code to access Bottle Assembly/Inspection Video
- Escanee el código para acceder al video de montaje de la botella/inspección




Sanitize Desinfectar

Before first use and once per day
Antes del primer uso y una vez al día.



Expression Collection Combo Kit

Kit Combo Expresión de Colección

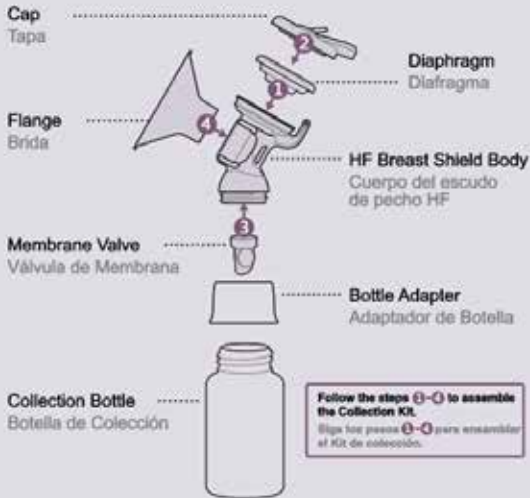

ⓘ Please refer to user manual page 13-15 for detailed information.
Consulte la página 50-52 del manual del usuario