

Hands-Free Collection Cups



Quick Start - Get To Know PA950

Inicio Rápido- conozca su extracto



DISCLAIMER TEXT GOES HERE. DISCLAIMER TEXT GOES HERE. DISCLAIMER TEXT GOES HERE. DISCLAIMER TEXT.




360° Rotating Tubing

Tubo giratorio de 360°

Tubing angle is adjustable according to your preference.

El ángulo del tubo se puede ajustar según sus preferencias.

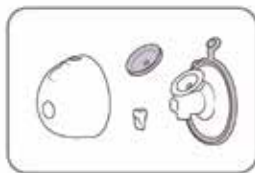

Fewer Parts

Menos piezas

Only 4 parts to clean.

Solo 4 partes para limpiar.



Rubber Stopper

Tapón de caucho

Prevents breast milk from leaking while in motion.

Evita que la leche materna se escape mientras está en movimiento.



Easy Pour

Fácil de verter

Pour spout designed to protect from leaking.

Boquilla de vertido diseñada para proteger contra fugas.

Before using your PA950 for the first time, please read the User Manual for more detailed instructions.

Antes de extraer leche por primera vez, lea las instrucciones de uso de su producto.



Wash Lavar



Before first use and after each use.
Antes del primer uso y después de cada uso.



Wash the One-Way Valve in warm soapy water, rub the tip gently using your thumb and fingers.

Lave la válvula unidireccional con agua jabonosa tibia, frote la punta suavemente con el pulgar y los dedos.

Sanitize Desinfectar



Before first use and after each use.
Antes del primer uso y una vez al día.



Use your thumb and a finger, gently seal any open tip and shape it back into a closed tip.

Use su pulgar y un dedo, selle suavemente cualquier punta abierta y vuelva a darle forma de punta cerrada.

- Scan code to access Bottle Assembly Video.
- Escanee código para acceder al video de Inspección y Ensamblaje de Botella



Follow the steps 1-5 to assemble the Collection Kit. Siga los pasos 1-5 para ensamblar el Kit de colección.

Diaphragm/Diafragma



⚠ This product is intended for personal use. Do not share.

70-PA950XX-RTXX Ver:A2205