

Quick Start - Get To Know Your Pump

Inicio Rápido- conozca su extractor



Rumble Tuff®



Breast Shield/Flange
Escudo de Pecho

Breast Shield Body
Cuerpo del Escudo de Pecho

One Way Valve
Válvula

Top View
Vista Superior



Vacuum Adjustment Knob
Botón de Ajuste de Succión

Sweet Essence equips with unique Vacuum Adjustment Knob that allows you to control the vacuum release time while the 2 expression phases allows the suction strength.

Manual Diaphragm Kit
Kit de Diafragma Manual

Bottle Adapter
Adaptador de Botella

Collection Bottle
Botella de Colección

Collection Bottle Base
Base para Botella de Colección



⚠ Before using your pump for the first time, please read the User Manual for more detailed instructions.

Antes de extraerse la leche por primera vez, lea las instrucciones de uso de su producto.




Wash Lavar

Before first use and after each use
Antes del primer uso y después de cada uso.



Sanitize Desinfectar

Before first use and once per day
Antes del primer uso y una vez al día.

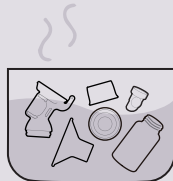

Note:

- Before use, wash and sanitize all parts that may come in contact with the breast or breast milk.
- For more detailed use and care instructions, please refer to the User Manual.
- For best results pump parts should be completely dry before use

Nota:

- Lave y desinfecte todas las partes que toquen el pecho o la leche materna antes de usarla por primera vez.
- Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre el uso y el cuidado.
- Para obtener los mejores resultados, las piezas del extractores deben estar completamente secas antes de su uso.

- Scan code to access Kit Assembly Video
- Escanee el código para ver el video de ensamblaje



Sweet Essence Manual Pump

Sweet Essence Extractor de Leche Manual



※ Please refer to user manual for detailed information.
Consulte el manual del usuario.